

Viera™

Breast ultrasound da **Clarius**®

Guia de início rápido

HOLOGIC®

 **clarius** ultrasound
anywhere



Para obter suporte técnico:
Entre em contato com o Suporte técnico da Hologic



Leia o Manual do scanner de ultrassom Viera para obter instruções completas, glossário de símbolos e informações sobre segurança.


1 Baixar o aplicativo Clarius a partir do iTunes ou da Google Play Store



2 Iniciar o aplicativo Clarius



3 Criar conta

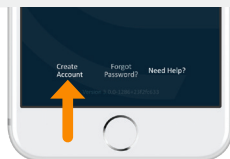

i Se você já tiver uma conta, faça login com a conta existente.


4 Introduzir a bateria

Após instalar o aplicativo Clarius no seu dispositivo inteligente, remova a patilha da bateria e reintroduza-a totalmente. A luz do scanner piscará em azul, depois em verde e, por fim, se desligará; o scanner aguarda no modo em espera até que o aplicativo seja iniciado.



5 Reclamar o seu scanner

Certifique-se de que o seu dispositivo inteligente esteja conectado à internet. Levará cerca de um minuto para que o seu scanner apareça no aplicativo.

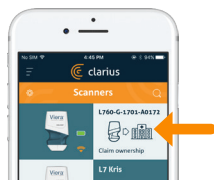


6 Criar ou selecionar instituição

Após reclamar o seu scanner, o aplicativo solicitará que você crie uma nova instituição ou selecione uma instituição que já esteja conectada à sua conta.




7 Selecionar scanner

Selecione o novo scanner na lista.

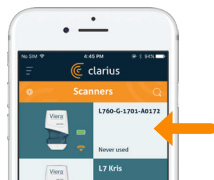

8 Observar o círculo de conexão de conexão

Quando o círculo de status estiver completo, o aplicativo Clarius estará conectado ao scanner.

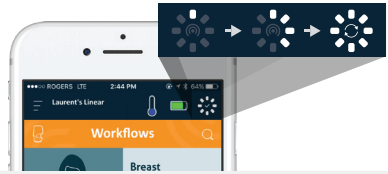


9 Reconectar à rede Wi-Fi Direct do scanner

Após a configuração inicial, o seu scanner Viera se conectará automaticamente ao seu dispositivo inteligente da próxima vez que você inserir a bateria. Para obter um melhor desempenho, é recomendado usar um dispositivo inteligente que suporte Wi-Fi de 5 GHz.


iOS*

O iOS 11 e as versões posteriores exibirão uma mensagem sempre que o scanner for ligado. Basta tocar no botão Join (Ingressar) e o scanner será conectado.

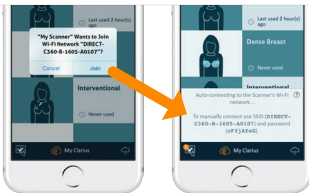

Android

Será exibida uma mensagem na tela para confirmar a conexão automática.

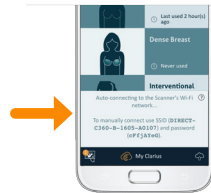


*OBSERVAÇÃO: Para o iOS 10 ou anterior, os usuários devem usar o método de configuração manual explicado em www.clarius.com/wifi. O iPhone 4s não suporta Wi-Fi de 5 GHz.


i Problemas de conexão? Experimente o método de configuração manual explicado aqui: www.clarius.com/wifi

10 Iniciar varredura


Selecione o tipo de exame na lista

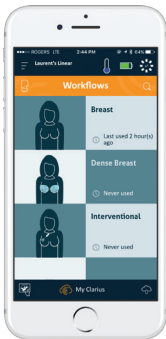

Introduza os dados demográficos do paciente ou avance para a próxima etapa

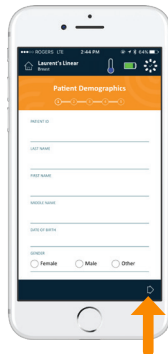


Pressione o botão de floco de neve para acessar a tela de aquisição de imagens em tempo real

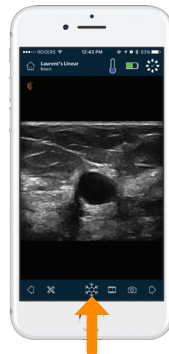

i Saiba mais sobre as funções básicas de aquisição de imagens em www.clarius.com/tutorials

Baixar atualizações


Em alguns casos, o sistema solicitará que você atualize o software do seu scanner. Basta pressionar **Update** (Atualizar) para continuar.

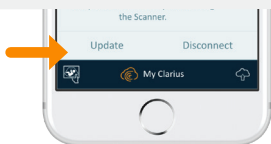

Durante uma atualização

A luz do scanner começa por piscar em azul e passa a roxo intermitente durante a atualização do software.

Não desligue o carregador da bateria durante esse tempo.

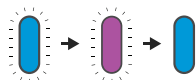

Também é apresentado um indicador roxo no canto superior direito da tela. Após a conclusão da atualização, a luz do scanner passará a azul e a conexão será restabelecida automaticamente.

i Após a atualização, poderá ser necessário consultar novamente a etapa 9 para restabelecer a conexão.

Dicas rápidas

Pesquise nossa base de dados de conhecimento de fácil utilização para obter dicas rápidas sobre como configurar e usar o scanner Viera e a Clarius Cloud.

www.clarius.com/faq

Dispositivos suportados

O scanner Viera é compatível com dispositivos iOS e Android. Para obter uma lista dos dispositivos suportados atualmente, visite:

www.clarius.com/devices

Manuais

Para obter uma cópia do Manual do usuário do scanner de ultrassom Viera sem custos adicionais ou em caso de dúvida sobre qualquer um dos itens da embalagem, entre em contato com o Suporte técnico da Hologic.

Suporte técnico da Hologic

Central de suporte nos EUA

+1-877-371-4372

+1-781-999-7750

BreastHealth.Support@hologic.com

Central de suporte na Europa

+32 2 711 4545

BE-Techsupport@hologic.com

Central de suporte na Austrália

+1-800-264073

+612-9888-8000

anz.service@hologic.com

Fabricado para:

Hologic, Inc.

Sede corporativa
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 EUA
Telefone: +1.508.263.2900
www.hologic.com

Fabricado por:

Clarius Mobile Health

350-3605 Gilmore Way
Burnaby, BC, V5G4X5, Canadá
hello@clarius.com
Telefone: +1.778.800.9975
www.clarius.com



Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada. Este produto demonstrou estar em conformidade com a CEM em condições que incluíram a utilização de dispositivos periféricos compatíveis. É importante que você utilize dispositivos periféricos compatíveis para diminuir a possibilidade de ocorrência de interferências em rádios, televisões e outros dispositivos eletrônicos.



Para obter suporte técnico:
Entre em contato com o Suporte técnico da Hologic



Leia o Manual do scanner de ultrassom Viera para obter instruções completas, glossário de símbolos e informações sobre segurança.